

INSTRUÇÕES DE USO

FRESA DIAMANTADA DESCARTÁVEL MACOM

Descrição:

As Fresas Diamantadas Descartáveis Macom é uma família de **produtos descartáveis**, **“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”**, destinados a procedimentos cirúrgicos, para perfuração e modelagem óssea. Os produtos desta família são acoplados nos equipamentos pneumáticos da marca MACOM, tais como: Craniótomo Drill, Trépano e Drill Diamond Max, e PANTHER - High Performance Pneumatic System Trépano-Craniótomo-Drill MACOM.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Este produto não apresenta contra-indicações desde utilizado da maneira correta.

A utilização do produto é inerente à formação profissional.

Especificações e características técnicas:

São fabricados em aço inoxidável em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 7153-1. Possuem formato característico, apresentados em diversos tamanhos de ponta (parte ativa) comprimentos (haste), os quais definem o tipo e o código do produto, formando uma família de produtos médicos. Na parte ativa há um revestimento de diamante natural atóxico.

Revestimento: A parte ativa e a haste são revestidas com nitreto de titânio.

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, esterilizado por óxido de etileno (ETO).

“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”.

Os produtos desta família não possuem componentes e acessórios associados.


Este produto não acompanha componente implantável.

Forma de Apresentação:

As Fresas Diamantadas Descartáveis Macom são fornecidas na condição montada, estéril, pronta para uso, embalada individualmente num blister duplo, selado com papel cirúrgico, acondicionado em cartuchos de papel cartão para transporte e acondicionamento.

Formas de apresentação do produto com comparativo técnico entre cada modelo da família de FRESA DIAMANTADA DESCARTÁVEL MACOM.

As instruções de uso não estão inclusas na embalagem sendo apresentado em um impresso à parte que acompanha a todos os produtos desta família.

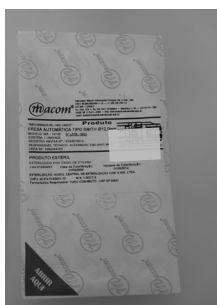

Blister duplo, selado com papel cirúrgico



Cartucho de papel cartão, envolvida e selada em filme poliolefínico termo encolhível

Comparativo técnico entre cada modelo da família:

| MODELO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
|----------|--|
| MA-DRD05 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 005 |
| MA-DRD06 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 006 |
| MA-DRD07 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 007 |
| MA-DRD08 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 008 |
| MA-DRD10 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 010 |
| MA-DRD12 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 012 |
| MA-DRD14 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 014 |
| MA-DRD15 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 015 |
| MA-DRD18 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 018 |
| MA-DRD20 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 020 |
| MA-DRD21 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 021 |
| MA-DRD23 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 023 |
| MA-DRD25 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 025 |
| MA-DRD27 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 027 |
| MA-DRD29 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 029 |
| MA-DRD30 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 030 |
| MA-DRD31 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 031 |
| MA-DRD33 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 033 |
| MA-DRD35 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 035 |
| MA-DRD38 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 038 |
| MA-DRD40 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 040 |
| MA-DRD42 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 042 |
| MA-DRD45 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 045 |
| MA-DRD46 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 046 |
| MA-DRD50 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 050 |
| MA-DRD55 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 055 |
| MA-DRD60 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 060 |
| MA-DRD65 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 065 |
| MA-DRD70 | FRESA DO DRILL DIAMANTADA Nº 070 |
| DM8.05D | FRESA ESFÉRICA 0,5 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.06D | FRESA ESFÉRICA 0,6 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.07D | FRESA ESFÉRICA 0,7 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.08D | FRESA ESFÉRICA 0,8 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.10D | FRESA ESFÉRICA 1,0 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.12D | FRESA ESFÉRICA 1,2 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.14D | FRESA ESFÉRICA 1,4 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.15D | FRESA ESFÉRICA 1,5 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.18D | FRESA ESFÉRICA 1,8 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.20D | FRESA ESFÉRICA 2,0 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.21D | FRESA ESFÉRICA 2,1 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.23D | FRESA ESFÉRICA 2,3 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.25D | FRESA ESFÉRICA 2,5 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.27D | FRESA ESFÉRICA 2,7 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.29D | FRESA ESFÉRICA 2,9 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.30D | FRESA ESFÉRICA 3,0 X 80,0MM DIAMANTADA |

| | |
|----------|---|
| DM8.31D | FRESA ESFÉRICA 3,1 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.33D | FRESA ESFÉRICA 3,3 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.35D | FRESA ESFÉRICA 3,5 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.38D | FRESA ESFÉRICA 3,8 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.40D | FRESA ESFÉRICA 4,0 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.42D | FRESA ESFÉRICA 4,2 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.45D | FRESA ESFÉRICA 4,5 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.46D | FRESA ESFÉRICA 4,6 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.50D | FRESA ESFÉRICA 5,0 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.55D | FRESA ESFÉRICA 5,5 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.60D | FRESA ESFÉRICA 6,0 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.65D | FRESA ESFÉRICA 6,5 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM8.70D | FRESA ESFÉRICA 7,0 X 80,0MM DIAMANTADA |
| DM9.05D | FRESA ESFÉRICA 0,5 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.06D | FRESA ESFÉRICA 0,6 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.07D | FRESA ESFÉRICA 0,7 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.08D | FRESA ESFÉRICA 0,8 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.10D | FRESA ESFÉRICA 1,0 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.12D | FRESA ESFÉRICA 1,2 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.14D | FRESA ESFÉRICA 1,4 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.15D | FRESA ESFÉRICA 1,5 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.18D | FRESA ESFÉRICA 1,8 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.20D | FRESA ESFÉRICA 2,0 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.21D | FRESA ESFÉRICA 2,1 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.23D | FRESA ESFÉRICA 2,3 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.25D | FRESA ESFÉRICA 2,5 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.27D | FRESA ESFÉRICA 2,7 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.29D | FRESA ESFÉRICA 2,9 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.30D | FRESA ESFÉRICA 3,0 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.31D | FRESA ESFÉRICA 3,1 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.33D | FRESA ESFÉRICA 3,3 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.35D | FRESA ESFÉRICA 3,5 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.38D | FRESA ESFÉRICA 3,8 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.40D | FRESA ESFÉRICA 4,0 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.42D | FRESA ESFÉRICA 4,2 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.45D | FRESA ESFÉRICA 4,5 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.46D | FRESA ESFÉRICA 4,6 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.50D | FRESA ESFÉRICA 5,0 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.55D | FRESA ESFÉRICA 5,5 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.60D | FRESA ESFÉRICA 6,0 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.65D | FRESA ESFÉRICA 6,5 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM9.70D | FRESA ESFÉRICA 7,0 X 90,0MM DIAMANTADA |
| DM11.05D | FRESA ESFÉRICA 0,5 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.06D | FRESA ESFÉRICA 0,6 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.07D | FRESA ESFÉRICA 0,7 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.08D | FRESA ESFÉRICA 0,8 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.10D | FRESA ESFÉRICA 1,0 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.12D | FRESA ESFÉRICA 1,2 X 110,0MM DIAMANTADA |

| | |
|----------|---|
| DM11.14D | FRESA ESFÉRICA 1,4 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.15D | FRESA ESFÉRICA 1,5 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.18D | FRESA ESFÉRICA 1,8 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.20D | FRESA ESFÉRICA 2,0 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.21D | FRESA ESFÉRICA 2,1 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.23D | FRESA ESFÉRICA 2,3 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.25D | FRESA ESFÉRICA 2,5 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.27D | FRESA ESFÉRICA 2,7 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.29D | FRESA ESFÉRICA 2,9 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.30D | FRESA ESFÉRICA 3,0 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.31D | FRESA ESFÉRICA 3,1 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.33D | FRESA ESFÉRICA 3,3 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.35D | FRESA ESFÉRICA 3,5 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.38D | FRESA ESFÉRICA 3,8 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.40D | FRESA ESFÉRICA 4,0 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.42D | FRESA ESFÉRICA 4,2 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.45D | FRESA ESFÉRICA 4,5 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.46D | FRESA ESFÉRICA 4,6 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.50D | FRESA ESFÉRICA 5,0 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.55D | FRESA ESFÉRICA 5,5 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.60D | FRESA ESFÉRICA 6,0 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.65D | FRESA ESFÉRICA 6,5 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM11.70D | FRESA ESFÉRICA 7,0 X 110,0MM DIAMANTADA |
| DM12.05D | FRESA ESFÉRICA 0,5 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.06D | FRESA ESFÉRICA 0,6 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.07D | FRESA ESFÉRICA 0,7 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.08D | FRESA ESFÉRICA 0,8 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.10D | FRESA ESFÉRICA 1,0 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.12D | FRESA ESFÉRICA 1,2 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.14D | FRESA ESFÉRICA 1,4 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.15D | FRESA ESFÉRICA 1,5 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.18D | FRESA ESFÉRICA 1,8 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.20D | FRESA ESFÉRICA 2,0 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.21D | FRESA ESFÉRICA 2,1 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.23D | FRESA ESFÉRICA 2,3 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.25D | FRESA ESFÉRICA 2,5 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.27D | FRESA ESFÉRICA 2,7 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.29D | FRESA ESFÉRICA 2,9 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.30D | FRESA ESFÉRICA 3,0 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.31D | FRESA ESFÉRICA 3,1 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.33D | FRESA ESFÉRICA 3,3 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.35D | FRESA ESFÉRICA 3,5 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.38D | FRESA ESFÉRICA 3,8 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.40D | FRESA ESFÉRICA 4,0 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.42D | FRESA ESFÉRICA 4,2 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.45D | FRESA ESFÉRICA 4,5 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.46D | FRESA ESFÉRICA 4,6 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.50D | FRESA ESFÉRICA 5,0 X 120,0MM DIAMANTADA |

| | |
|------------|---|
| DM12.55D | FRESA ESFÉRICA 5,5 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.60D | FRESA ESFÉRICA 6,0 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.65D | FRESA ESFÉRICA 6,5 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM12.70D | FRESA ESFÉRICA 7,0 X 120,0MM DIAMANTADA |
| DM16.05D | FRESA ESFÉRICA 0,5 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.06D | FRESA ESFÉRICA 0,6 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.07D | FRESA ESFÉRICA 0,7 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.08D | FRESA ESFÉRICA 0,8 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.10D | FRESA ESFÉRICA 1,0 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.12D | FRESA ESFÉRICA 1,2 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.14D | FRESA ESFÉRICA 1,4 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.15D | FRESA ESFÉRICA 1,5 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.18D | FRESA ESFÉRICA 1,8 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.20D | FRESA ESFÉRICA 2,0 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.21D | FRESA ESFÉRICA 2,1 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.23D | FRESA ESFÉRICA 2,3 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.25D | FRESA ESFÉRICA 2,5 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.27D | FRESA ESFÉRICA 2,7 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.29D | FRESA ESFÉRICA 2,9 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.30D | FRESA ESFÉRICA 3,0 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.31D | FRESA ESFÉRICA 3,1 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.33D | FRESA ESFÉRICA 3,3 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.35D | FRESA ESFÉRICA 3,5 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.38D | FRESA ESFÉRICA 3,8 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.40D | FRESA ESFÉRICA 4,0 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.42D | FRESA ESFÉRICA 4,2 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.45D | FRESA ESFÉRICA 4,5 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.46D | FRESA ESFÉRICA 4,6 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.50D | FRESA ESFÉRICA 5,0 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.55D | FRESA ESFÉRICA 5,5 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.60D | FRESA ESFÉRICA 6,0 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.65D | FRESA ESFÉRICA 6,5 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM16.70D | FRESA ESFÉRICA 7,0 X 160,0MM DIAMANTADA |
| DM9.05D-HN | FRESA ESFÉRICA 0,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.06D-HN | FRESA ESFÉRICA 0,6 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.07D-HN | FRESA ESFÉRICA 0,7 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.08D-HN | FRESA ESFÉRICA 0,8 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.10D-HN | FRESA ESFÉRICA 1,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.12D-HN | FRESA ESFÉRICA 1,2 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.14D-HN | FRESA ESFÉRICA 1,4 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.15D-HN | FRESA ESFÉRICA 1,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.18D-HN | FRESA ESFÉRICA 1,8 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.20D-HN | FRESA ESFÉRICA 2,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.21D-HN | FRESA ESFÉRICA 2,1 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.23D-HN | FRESA ESFÉRICA 2,3 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.25D-HN | FRESA ESFÉRICA 2,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.27D-HN | FRESA ESFÉRICA 2,7 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.29D-HN | FRESA ESFÉRICA 2,9 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |

| | |
|------------|---|
| DM9.30D-HN | FRESA ESFÉRICA 3,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.31D-HN | FRESA ESFÉRICA 3,1 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.33D-HN | FRESA ESFÉRICA 3,3 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.35D-HN | FRESA ESFÉRICA 3,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.38D-HN | FRESA ESFÉRICA 3,8 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.40D-HN | FRESA ESFÉRICA 4,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.42D-HN | FRESA ESFÉRICA 4,2 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.45D-HN | FRESA ESFÉRICA 4,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.46D-HN | FRESA ESFÉRICA 4,6 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.50D-HN | FRESA ESFÉRICA 5,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.55D-HN | FRESA ESFÉRICA 5,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.60D-HN | FRESA ESFÉRICA 6,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.65D-HN | FRESA ESFÉRICA 6,5 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |
| DM9.70D-HN | FRESA ESFÉRICA 7,0 X 90,0MM DIAMANTADA (HASTE NORMAL) |

Orientações sobre o uso do produto:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos. **A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.**

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, esterilizado por óxido de etileno (ETO).

“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”, fornecido Estéril por óxido de etileno (ETO).

Instruções de uso

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Acoplar a fresa ou broca no equipamento pneumático Macom conforme as instruções de uso fornecidas no Manual de Instruções do respectivo equipamento pneumático marca MACOM.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

Este produto não apresenta contra-indicações desde utilizado da maneira correta. A utilização do produto é inerente à formação profissional.

Condições de Armazenamento

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação particulada; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.



Condições para o Transporte

O transporte deve ser realizado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

Condições de Manipulação

O manuseio deve ser realizado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais sobre o uso do produto:

Advertências

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As FRESAS DIAMANTADAS DESCARTÁVEIS MACOM são fornecidas estéreis.

“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril, ***“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”***, pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reprocessado e reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reprocessse e reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com conseqüências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.



No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação particulada; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

Precauções

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As FRESAS DIAMANTADAS DESCARTÁVEIS MACOM são fornecidas estéreis.

“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril, *“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”*, não se deve reprocessar e reutilizar, pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reprocessado e reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reprocessar e reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com consequências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação particulada; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.



O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

Contraindicações

Não se aplica

Efeitos Adversos

Não se aplica

Não foram constatados efeitos adversos diretamente relacionados a esta família de produtos. Este produto não produz nenhum efeito adverso indesejável se todas as recomendações, advertências/precauções descritas neste documento forem adotadas.

Fabricado por:

Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda.

CNPJ: 59.650.556/0001-76

Av. João Bassi, 572 - Pq. Industrial Ferreira Fernandes

CEP 07172-440 - Guarulhos - SP

Fone/Fax: +55 11 2431-4636

site: www.macominstrumental.com.br

e-mail: macom@macominstrumental.com.br

- ◆ Registro ANVISA nº 10243070040
- ◆ Responsável Técnico
Eng. Alexandre Emiliano Muniz
CREA-SP 5062354150

Revisão: 01/22